

SALOY LUKULAITE

Käyttöhje

ASENNUS

1. Kytke videokaapelin toinen pää lukulaitteen keltaiseen liittimeen ja toinen pää mukana toimitetun SCART-adapterin keltaiseen liittimeen
2. Liitä SCART-adapteri television SCART-liittimeen
3. Kytke virtajohto lukulaitteen punaiseen liittimeen
4. Liitä virtajohto verkkovirtaan
5. Kytke virta televisioon ja valitse SCART-liitintä vastaava AV-kanava

SÄÄTÄMINEN

Jos lukulaitteella halutaan lukea jotain muuta kuin sanomalehteä, jossa on standardi 4,5 cm palstanleveys, voidaan lukulaitteen jalustaa säätämällä vaikuttaa kuvattavan alueen kokoon. Tällöin lukulaitteen kamera tulee myös tarkentaa uudeelleen.

1. Löysennä kameran lukitusvipua (kuva 1) ja säädä kamera haluttuun asentoon
2. Löysennä linssintarkennusruuvia (kuva 2) kunnes linssiä voi kääntää vapaasti
3. Käännä linssiä kunnes kuva näyttää terävältä television ruudulla
4. Kiristä linssintarkennusruuvi



KUVA 1



KUVA 2

Valmistaja:

Saloy Oy

Sopulitie 2 B 00800 Helsinki

09 - 389 3597

info@saloy.net